


1. С помощью линейки или измерительной ленты измерьте диаметр соска (в мм), проходя через центр соска и исключая область ареолы.
2. Подберите подходящий размер воронки, который наиболее близок к полученному в результате измерения значению.

РАЗМЕР СОСКА

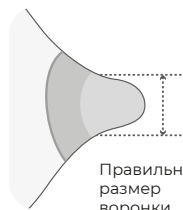

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ NUVITA

1. Гарантия действительна только при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи и печатью.
2. Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	Гарантия 1 год	
	____/____/____	
	Дата продажи	
	____	____
	Серийный номер	Печать магазина

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NUVITA

Москва ООО «Кид Трейд»
Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 2
Тел.: +7 (800) 775-67-39, доб. 5

Производитель:

«Anteprima Brands International Ltd»
1 Ferris building, St.Luke's Street, PTA1020
Guardamangia, Мальта, GLN 5358010000219
Сделано в Китае.

Поставщик/Импортер: ООО «Кид Трейд»,
125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп.2.
Тел: +7 (495) 648-64-24.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Срок службы – 3 года.

3. Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в талоне.

4. Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- механические повреждения корпуса;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и/или жидкости;
- повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная влажность);
- быстроизнашивающиеся детали (мембраны, клапаны);
- недостатки, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и хранения;
- повреждения, вызванные в результате использования изделия в профессиональных целях;
- повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих, а также неквалифицированно произведенного ремонта НЕ в гарантийном центре Nuvita.

Условия Гарантии регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей» и гарантийной политикой продавца/сервисного центра.

E-mail: service@edmgroupp.ru
Режим работы:
пн-чт с 09:00 до 18:00,пт с 09:00 до 17:00

Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Прибор не является медицинским изделием.

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



WEAR

SMART

MATERNO



1287W
1287KDW
1288W

Инструкция по эксплуатации

Дорогой покупатель, вы приобрели один из самых современных и надежных молокоотсосов на рынке – молокоотсос MATERNO SMART Wear бренда Nuvita. Мы разработали данное устройство, чтобы оно было максимально удобным в использовании. Пожалуйста, прочтите и сохраните данную инструкцию, чтобы иметь полное представление о всех преимуществах молокоотсоса. Обязательно возьмите с собой в дорогу четыре щелочные батарейки типа AA.

ВНИМАНИЕ

- Не оставляйте данное изделие в условиях высокой температуры на длительное время.
- Молокоотсос следует мыть до и после использования.
- Перед началом использования убедитесь, что молокоотсос правильно собран и его части надежно установлены.
- При сборке или разборке изделия, следуйте указаниям, приведенным в разделе «Сборка молокоотсоса».
- Все материалы, используемые в данном изделии, соответствуют национальным стандартам безопасности, наличие небольшого запаха является нормой.
- Если вы хотите использовать электрический молокоотсос на этапе снижения лактации, пожалуйста, используйте его под руководством врача.
- Не используйте молокоотсос слишком долго за одну процедуру сцеживания во избежание травм груди.
- Если вы почувствуете боль во время использования молокоотсоса, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.

- Молокоотсос предназначен для личного использования, поэтому не рекомендуется передавать его в пользование другим лицам.
- Используйте данное изделие только по назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте молокоотсос в душе или в ванной.
- Не скручивайте и не завязывайте узлом соединительную трубку в процессе использования.
- Хранить в недоступном для детей месте.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Молокоотсос имеет трехфазную технологию: 1-я фаза с 9 регулируемыми уровнями стимуляции с работой в течение 2 минут. 2-я фаза с 9 регулируемыми уровнями сцеживания на Ваш выбор. 3-я фаза (выбирается при необходимости) для полного извлечения молока из груди для предотвращения лактостаза (застоя молока).
2. Устройство оснащено антирефлюксной системой, которая предотвращает возврат грудного молока в блок управления и повреждение молокоотсоса в процессе сцеживания.
3. Materno Smart Wear работает от сети и имеет перезаряжаемую батарею, поэтому его можно взять с собой в поездку и использовать на работе.

ЭЛЕМЕНТЫ


Элемент	1287W Кол-во	1287KDW Кол-во	1288W Кол-во
1. Адаптер питания	1	-	1
2. Накладка на воронку	1	1	2
3. Воронка	1	1	2
4. Силиконовая вставка	1	1	2
5. Молокоотсос с воронкой	1	1	2
6. Лепестковый клапан	1	1	2
7. Крышка	1	1	2
8. Кольцо для крышки	1	1	2
9. Портативная чаша для молока	1	1	2
10. Силиконовая трубка	1	1	2
11. Силиконовая воронка 20 мм	1	1	2
12. Силиконовая воронка 22 мм	1	1	2
13. Силиконовая воронка 24 мм	1	1	2
14. Блок управления	1	-	1
15. Мешочек для хранения (на фото отсутствует)	1	-	1

www.nuvita-baby.ru

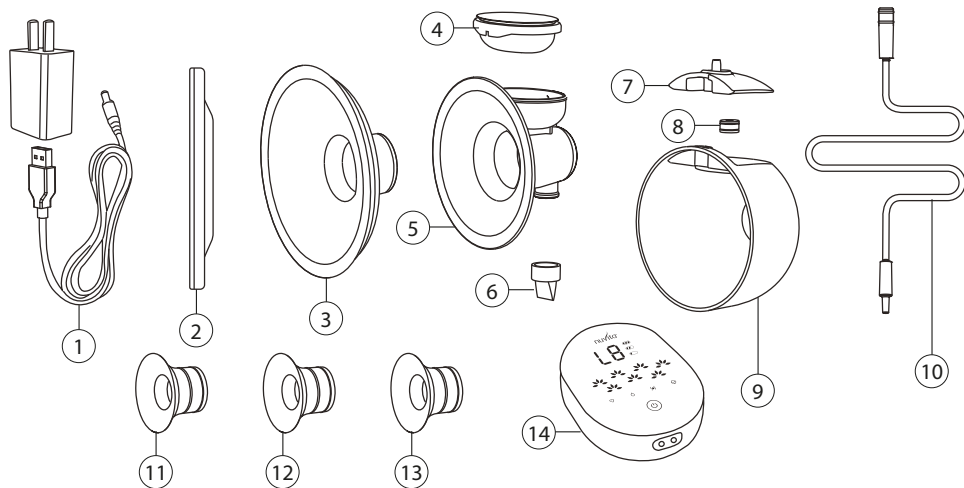


СБОРКА МОЛОКООТСОСА

1. Вставьте воронку "А" в корпус молокоотсоса "D".
2. Установите силиконовую вставку "С" на верхнюю часть корпуса молокоотсоса. Убедитесь, что края силиконовой вставки плотно прилегают к корпусу, а специальная выемка установлена правильно.
3. Закрепите лепестковый клапан "Е" в нижней части корпуса молокоотсоса и убедитесь, что он установлен так, как показано на рисунке 3.
4. Прикрепите корпус молокоотсоса к портативной чаше "Н" и убедитесь, что они плотно прилегают друг к другу.
5. Наденьте крышку на портативную чашу и плотно прижмите их друг к другу.
6. Для одинарного подключения подсоедините к блоку управления портативную чашу с помощью соединительной силиконовой трубки.
7. Для двойного подключения подсоедините к блоку управления 2 портативные чаши с помощью 2 соединительных силиконовых трубок.

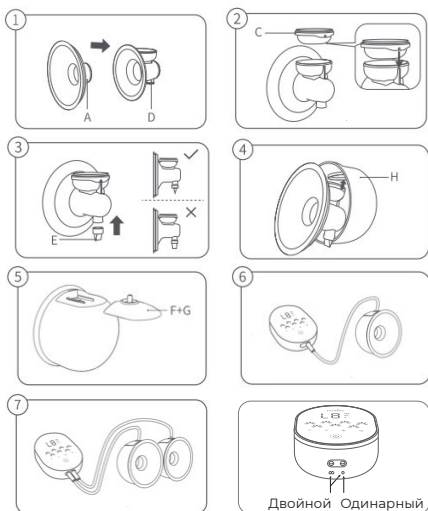

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

- A1. Кнопка включения и выключения
A2. Индикатор режима стимуляции
A3. Индикатор режима сцеживания
A4. Режим дренажа / предотвращение застоя молока
A5. Одинарное / Двойное подключение (индикатор ВКЛ – одинарное подключение / индикатор ВыКЛ – двойное подключение)
B1. Индикатор уровня
B2. Индикатор заряда
B3. Индикатор ритма

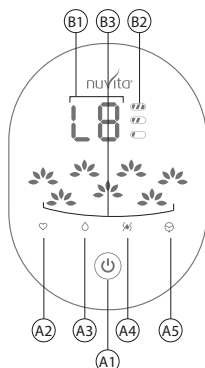

УРОВНИ ЧАСТОТЫ ВСАСЫВАНИЯ:


- 1-9 Режим стимуляции с быстрым и коротким уровнем всасывания.
- 1-9 Режим сцеживания (имитирует сосание ребенка). Уровень всасывания этой фазы более медленный, глубокий и продолжительный.
- 1-9 Режим дренажа для предотвращения застоя молока, помогает предотвратить лактастаз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Всегда мойте руки перед использованием. Убедитесь, что детали молокоотсоса промыты и собраны точно в соответствии с инструкцией.
2. Направьте центр собранной чаши молокоотсоса на сосок и держите его близко к груди, а другой рукой придерживайте грудь, чтобы не допустить попадания воздуха.
3. Отрегулируйте бюстгальтер для кормления так, чтобы вам было удобно, закрепите чашу на груди, держите тело вертикально и начинайте сцеживание после правильного подключения молокоотсоса к блоку управления. (Примечание: не ложитесь, не наклоняйтесь и не делайте резких движений во время сцеживания).
4. Если диаметр соска не соответствует диаметру во-

ронки, используйте дополнительную силиконовую воронку. Вставьте силиконовую воронку нужного размера в воронку и убедитесь, что она плотно прилегает к ней (рис.4).

5. После завершения сцеживания аккуратно снимите корпус молокоотсоса, снимите крышку с чаши и перелейте молоко в бутылочку для хранения молока или пакет для хранения молока. (Примечание: не превышайте максимальный объем 180 мл).
6. Разберите и промойте молокоотсос. Силиконовую трубку, воронку, чаши для сбора молока, силиконовую вставку, лепестковый клапан и другие принадлежности можно поместить в стерилизатор для дезинфекции (за исключением силиконовой трубки в сборе и чаши в сборе). Проведите стерилизацию неэлектронных деталей для следующего использования.

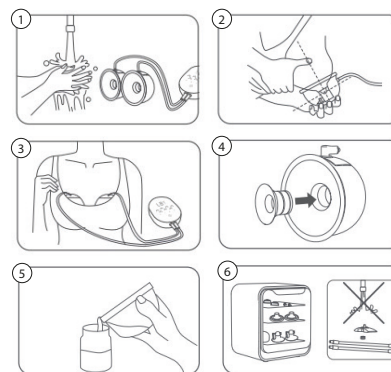


НАСТРОЙКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

- Включите питание, нажав кнопку A1. Экран устройства произведет самотестирование и начнет мигать.
- Нажмите кнопку A2 для выбора режима стимуляции. По умолчанию установлен уровень 1. Нажмите кнопку A2 еще раз, чтобы увеличить интенсивность всасывания. После 2 минут работы в режиме стимуляции устройство автоматически переключится в режим сцеживания. Нажмите кнопку A3 несколько раз, чтобы увеличить интенсивность всасывания. Молокоотсос автоматически отключается после 30 минут работы. Если молоко начнет поступать раньше, нажмите кнопку A3, чтобы перейти в режим сцеживания. Нажмите кнопку A3 несколько раз, чтобы увеличить интенсивность всасывания. Молокоотсос автоматически отключается после 30 минут работы.
- В режиме сцеживания снова нажмите A2, чтобы вернуться в режим стимуляции с тем же уровнем интенсивности всасывания, что и в предыдущем сеансе стимуляции. После 2 минут работы в режиме стимуляции устройство автоматически переключится в режим сцеживания. Молокоотсос автоматически отключается после 30 минут работы.
- Нажмите кнопку A4 для выбора режима дренажа. Нажмите кнопку A4 еще раз, чтобы увеличить интенсивность всасывания. Молокоотсос автоматически отключится через 5 минут.

УСТАНОВКА АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

ВАЖНО: отключите устройство перед подключением к адаптеру.

1. Вставьте круглый штекер в гнездо на блоке управления, а другой конец адаптера в розетку, как показано на схеме.
2. При низком заряде батареи иконка будет мигать, указывая на то, что необходимо зарядить батарею.
3. Во время зарядки все 3 иконки будут мигать.
4. Когда устройство будет полностью заряжено, останется гореть только иконка с 3 делениями.

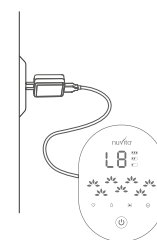

ОЧИСТКА

- После каждого использования очищайте детали, пригодные для чистки.
- Не используйте для чистки ершики со стальной проволокой, острые инструменты или агрессивные чистящие средства.
- Для чистки рекомендуется использовать мягкую губку или щетку и нейтральное моющее средство.
- Силиконовую трубку, накладку на воронку, чашу для молока и силиконовую вставку можно поместить в стерилизатор для дезинфекции (за исключением силиконовой трубки в сборе и чаши в сборе).
- Силиконовая вставка и лепестковый клапан изготовлены из силикона. Не рекомендуется стерилизовать их при высокой температуре в течение длительного времени, чтобы не спровоцировать износ или деформацию.
- Не погружайте соединительную трубку в сборе и чашу в сборе в воду для очистки, это может привести к необратимому повреждению изделия. Протирайте их чистой влажной тканью.
- При разборке и чистке не потеряйте мелкие детали.
- При чистке будьте осторожны с лепестковым клапаном, силиконовой вставкой и другими деталями. Если они повредятся, это повлияет на работу молокоотсоса.
- Данное изделие нельзя нагревать и дезинфицировать в микроволновой печи.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы постарались тщательно продумать каждую деталь, комплектацию изделия и прилагаемую документацию для Вашего удобства. Поэтому в случае возникновения проблем при использовании молокоотсоса рекомендуем еще раз повторить все операции, точно следуя инструкциям в руководстве. Для получения дополнительной информации о товаре зайдите на сайт www.nuvita-baby.ru.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР ВОРОНКИ

Сцеживание грудного молока не должно сопровождаться неприятными ощущениями, а размер воронки для груди в значительной степени влияет на ощущения, которые вы испытываете при использовании молокоотсоса. Воронки для груди Nuvita доступны в 3 размерах: 20, 22 и 24 мм.