





nuvitamed 

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР**



Руководство по эксплуатации

2150

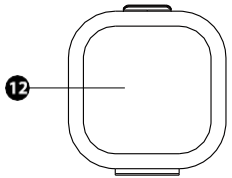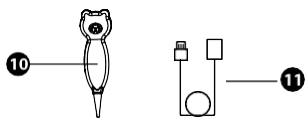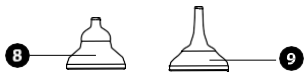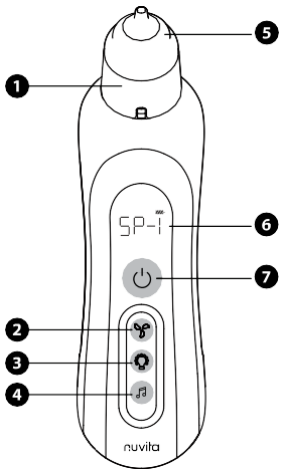

## ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

---



### ВАЖНО

- Не подвергайте этот продукт длительному воздействию высокой температуры, повышенной влажности или прямых солнечных лучей.
- Не допускайте сильного сдавливания, повреждения или случайного падения данного изделия.
- Данное изделие подходит только для высасывания выделений из носа. Не используйте его не по назначению, например, для всасывания воды или кожи.
- Если всасывание сильно снизилось или звук мотора стал тише, своевременно зарядите прибор.
- При использовании не позволяйте ребенку задерживать дыхание, глотать слюну, держите рот ребенка открытым, чтобы не допустить сильного давления в ушах.
- В случае возникновения боли или дискомфорта во время использования, немедленно прекратите использование и обратитесь ко врачу.
- Не вводите отсасывающую насадку в носовую полость под чрезмерным давлением.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства и положите его в надежное для хранения.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

---

Соответствующие рисунки на стр. 2.

- |    |                                 |     |                    |
|----|---------------------------------|-----|--------------------|
| 1. | Сборный резервуар               | 5.  | Насадка А          |
| 2. | Кнопка интенсивности всасывания | 6.  | Светодиодный экран |
| 3. | Кнопка цветной подсветки        | 7.  | Кнопка включения   |
| 4. | Кнопка с мелодиями              | 8.  | Насадка В          |
|    |                                 | 9.  | Насадка С          |
|    |                                 | 10. | Пинцет             |
|    |                                 | 11. | USB charging cable |
|    |                                 | 12. | Storage box        |

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

- **КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ.** Нажмите кнопку включения (7), чтобы включить или выключить назальный аспиратор.
- **КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВСАСЫВАНИЯ.** Всасывание имеет пять уровней интенсивности. Нажмите кнопку интенсивности всасывания (2) один раз, чтобы перейти на уровень 1. Каждое последующее нажатие кнопки интенсивности всасывания будет переходить на следующий уровень, вплоть до уровня 5.
- **КНОПКА ЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКИ.** Нажмите кнопку цветной подсветки (3), чтобы включить цветные огоньки, которые будут развлекать ребенка во время отсасывания из носа, автоматически меняя цвет.
- **КНОПКА С МЕЛОДИЯМИ.** Нажмите кнопку с мелодиями (4), чтобы воспроизвести 3 успокаивающие колыбельные, способствующие расслаблению и комфорту ребенка во время отсасывания из носа.

## ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




### ВАЖНО

- Полностью зарядите прибор перед первым использованием.
- Адаптер для зарядки не прилагается. Вы можете использовать обычный бытовой адаптер для зарядки (вход 5В 1А; выход 3,7 Вт).
- Во время зарядки индикатор питания на светодиодном экране (6) будет мигать.
- Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор питания перестанет мигать.
- При первом использовании выполните цикл очистки, следуя инструкциям на стр. 6.


### ШАГ 1

Вставьте силиконовую насадку (5), (8) или (9) в сборный резервуар (1).

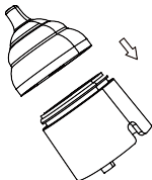


### ШАГ 2

Вставьте сборный резервуар в корпус прибора.

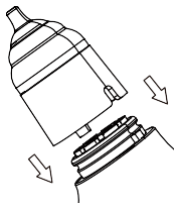


## ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


- Разместите назальный аспиратор вплотную к носовой полости, не оставляя зазоров, так будет легче отсасывать носовую слизь.
- Прежде чем отсасывать твердые выделения из носа или липкую носовую слизь, размягчите их, приложите к носу теплое полотенце или капните обычный физраствор.
- Пожалуйста, время от времени обращайтесь внимание на резервуар для сбора носовой слизи постоянно. Если носовой слизи будет слишком много, он может переполниться.
- Пожалуйста, вовремя выключайте аппарат, когда слизь в резервуаре переполнена, и очистите его. Вытрите ватным тампоном носовую слизь на насадке и в резервуаре.
- Пожалуйста, слейте воду и высушите насадку и резервуар после очистки.
- Не опускайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Пожалуйста, используйте этот прибор в правильной позе/способе, чтобы избежать всасывания жидкости внутрь носовых проходов.

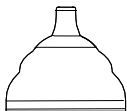

**НАСАДКА А**


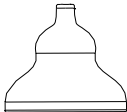


**НАСАДКА В**

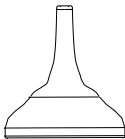

**НАСАДКА С**

- **Насадка А.** Самая большая насадка (5) помогает младенцам и детям отсасывать носовую слизь гнойного типа.
- **Насадка В.** Силиконовая всасывающая насадка типа "тыква" (8), подходит для всасывания неглубокой слизи.
- **Насадка С.** Всасывающая насадка воронкообразного типа (9), подходит для всасывания глубокой слизи.

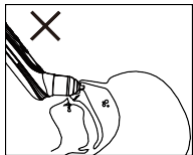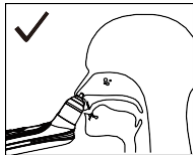

## ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Следуйте этим инструкциям, чтобы избежать риска для здоровья и повреждения изделия:

- Очищайте прибор перед каждым использованием. Это очень важно для поддержания надлежащей гигиены, особенно в случае бактериальных и вирусных инфекций или при работе с маленькими детьми.
- **КОРПУС:** Используйте мягкую сухую (или слегка влажную) ткань без добавления моющих средств.
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ:** В этом устройстве реализована самая передовая технология антирефлюкса.

### ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ:

1. Наполните миску теплой водой
2. Погрузите наконечник насадки в воду, направив его вниз, и начните всасывать в течение 30 секунд. Вода пройдет из насадки в резервуар и выльется вбок, таким образом, обеспечивая надлежащую очистку всех деталей.
3. По окончании и очистки встряхните прибор, держа наконечник насадки направленным вниз, чтобы остатки воды полностью вышли из прибора.
4. Держа прибор кончиком насадки вниз, разберите насадку и резервуар и поставьте прибор вертикально на кухонное полотенце, чтобы облегчить выход капель воды, которые могут проникнуть в основной корпус и нанести непоправимый ущерб.
5. **НАСАДКИ И РЕЗЕРВУАР:** после очищения, как описано в предыдущем пункте, назальные насадки и резервуар для сбора слизи можно промыть проточной водой и простерилизовать кипячением (100° C) или в паровом стерилизаторе.
6. Никогда не кладите основной корпус в посудомоечную машину или под струю воды.
7. Никогда не используйте потенциально токсичные чистящие средства, которые могут попасть на кожу или слизистые оболочки, а также попасть в организм или вдохнуться.
8. Не используйте абразивные средства и не погружайте устройство в воду.
9. Избегайте механической очистки с помощью щеток или других подобных средств, так как это может привести к непоправимым повреждениям.

Пункт 2

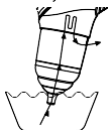

Пункт 3



Пункт 4



## ДОПОЛНЕНИЕ

- Не ремонтируйте и не настраивайте устройство самостоятельно. В этом случае правильная работа устройства не гарантируется.
- Не открывайте устройство. Несоблюдение этого указания приведет к аннулированию гарантии.
- Ремонт должен выполняться только в авторизованном сервисном центре.
- По соображениям охраны окружающей среды не выбрасывайте устройство в бытовые отходы по окончании срока его службы. Утилизируйте устройство в подходящем местном пункте сбора или переработки отходов. Если у вас возникли вопросы, обратитесь в организацию, ответственную за утилизацию отходов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электрический назальный аспиратор
Модель	2150
Мощность всасывания	1-й уровень: 25КПА, 2-й уровень: 35КПА, 3-й уровень: 45КПА, 4-й уровень: 55КПА, 5-й уровень: 65КПА
Тип батареи	Перезаряжаемый литиевый аккумулятор 3,7 Вт; 450 мАч; Напряжение: 3,7 В
Напряжение зарядки	5 В; Рабочее : 3.6-4.2V
Время зарядки	3 часа
Продолжительность заряда	55 минут использования
Уровень шума	1-й уровень: 44DB, 2-й уровень: 50DB, 3-й уровень: 56DB, 4-й уровень: 60DB, 5-й уровень: 65DB
Безопасность материалов	Без бисфенола, ABS пластик, силикон, не токсично

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

---

1. Гарантия действительна только при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи и печатью.

2. Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока.

3. Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в талоне.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- механические повреждения корпуса;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и/или жидкости;
- повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная влажность, температура);
- быстроизнашивающиеся детали (мембраны, клапаны, насадки);
- недостатки, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и хранения;
- повреждения, вызванные в результате использования изделия в профессиональных целях;
- повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих, а также неквалифицированно произведенного ремонта НЕ в гарантийном центре NuVita.

Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Прибор не является медицинским изделием.

<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b>	<b>Гарантия 1 год</b>	
	____ / ____ / ____ <b>Дата продажи</b>	
	_____ <b>Серийный номер</b>	_____ <b>Печать магазина</b>

### **СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NUVITA**

Москва ООО «Кид Трейд» Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 2 Тел.: +7 (800) 775-67-39, доб. 5

E-mail: [service@edmgroun.ru](mailto:service@edmgroun.ru) Режим работы:

пн-чт с 09:00 до 18:00, пт с 09:00 до 17:00

#### **Производитель:**

«Anteprima Brands International Ltd» 1 Ferris building, St.Luke's Street,  
PTA1020 Guardamangia, Мальта, GLN 5358010000219

Сделано в Китае.

#### **Поставщик/Импортер:**

ООО «Кид Трейд» 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп.2.

Тел: +7 (495) 648-64-24.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы - 3 года.

**[www.nuvita-baby.ru](http://www.nuvita-baby.ru)**

**EAC**

