



www.nuvita-baby.ru

1085

СТЕРИЛИЗАТОР
ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ: Стерилизатор подходит для использования в микроволновых печах мощностью от 800 до 1850 Вт. Стерилизатор вмещает до 3 бутылочек Nuvita объемом 250 мл с принадлежностями.

ОПИСАНИЕ:

- 1 Подставка для принадлежностей
- 1 держатель для бутылочек
- 1 пластиковый контейнер (стерилизатор)

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Никогда не используйте стерилизатор в микроволновой печи без воды.
2. Никогда не кладите в микроволновую печь металлические предметы.
3. Не используйте в микроволновой печи функцию гриля для стерилизации.
4. Используйте стерилизатор только в микроволновой печи с поворотным подносом.
5. Храните стерилизатор в недоступном для детей месте, особенно после стерилизации, так как он может быть слишком горячим.
6. Всегда мойте бутылочки и принадлежности перед их стерилизацией.
7. Всегда добавляйте необходимое количество воды в контейнер и соблюдайте рекомендованное время стерилизации.
8. Стерилизатор, детские бутылочки, соски и крышка после стерилизации остаются горячими. Не открывайте крышку сразу после завершения стерилизации, есть опасность получить ожог.
9. Стерилизатор не подходит для стеклянных бутылочек, так как они могут взорваться. Если вы хотите стерилизовать предметы, отличные от бутылочек и принадлежностей к ним, убедитесь, что они выдерживают температуру до 100°C и не содержат металлических деталей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Внимательно прочтите инструкцию перед использованием стерилизатора Nuvita 1085.
- Перед началом стерилизации промойте бутылочки, снимите кольцо с соски.

- Снимите держатель для бутылочек.
- Налейте в контейнер стерилизатора 200 мл воды.
- Установите держатель для бутылочек обратно в контейнер.
- Поместите крышки, соски, кольца для бутылочки и силиконовые клапаны в соответствующие отверстия, только затем бутылочки.
- Закройте крышку и поместите стерилизатор в микроволновую печь. Следуйте следующими инструкциями:

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
800-1100 Вт	4 минуты
1850 Вт	2 минуты

Подождите 2 минуты, прежде чем вынимать стерилизатор из микроволновой печи, он может быть очень горячим. По окончании стерилизации вылейте всю оставшуюся воду из контейнера.

ЧИСТКА:

- Если используемая вода слишком жесткая, на бутылочках и в контейнере может образоваться накипь. Чтобы удалить ее, налейте 250 мл уксуса и 250 мл воды в контейнер и оставьте до полного удаления накипи. По окончании чистки тщательно промойте контейнер и вытрите его насухо мягкой тканью.

УТИЛИЗАЦИЯ:

- Стерилизатор Nuvita 1085 можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.
- Утилизируйте упаковку отдельно в соответствии с национальными правилами утилизации отходов.